



Schlauchschutz-(halte)schal °Emma° bei Ösophagus-/ Speiseröhrensonde

Durch Katzen in unserem Verein bin ich auf die Idee gekommen die Fütterung über die Ösophagus-/ Speiseröhrensonde etwas zu vereinfachen. Kein Ab-, Um- und Aufwickeln mehr mit elastischer Binde, sondern einfach den Schlauchschutz-(halte)schal °Emma° über der Mullkompressen am Schlaucheingang verwenden. Dies erspart Tier und Mensch Stress.

Die Oberfläche ist aus wasserfestem und abwaschbarem Material, bei der Unterseite habe ich flauschigen Baumwollflanell oder Molton verwendet.

An der Vorderseite ist ein etwas breiterer Klettverschluss angebracht damit man die Weite dem Hals des Tieres anpassen kann.

Anlegen des Schals:

Zuerst die eingeschnittene Mullkompressen am Eingang der Sonde platzieren
Sonde vorsichtig durch das Knopfloch führen
Schal vorne verschließen. Wichtig! Bitte immer einen fingerbreiten Platz unter dem Schal lassen damit die Atmung des Tieres nicht behindert wird.
Schlauch mit den beiden Klettverschlüssen oben gut fixieren.

Ablegen des Schals:

Die Klettverschlüsse oben lösen
Verschluss am Hals vorne öffnen
Den Schlauch sehr vorsichtig durch das Knopfloch ziehen

Über die Versorgung der Wunde unter dem Schlauchschutz-(halte)schal °Emma° informiert sie ihr Tierarzt. Bitte immer die Anweisungen des Tierarztes befolgen denn nur er weiß was für ihr Tier das Richtige ist!!!!

Waschanleitung:

Bei leichter Verschmutzung außen: Flecken und Schmutz mit einem weichen Schwamm und einer Lösung aus Wasser und Seife (30°C) oder einem milden Reinigungsmittel entfernen.

Waschmaschine	30 Grad mit Colorwaschmittel Nicht mit aggressiven Chemikalien reinigen, die Lösungsmittel und Bleichmittel enthalten
Trockner	Nein
Chloren	Nein
Weichspüler	Nein
Chemische Reinigung	Nein
Bügeln	Nur die Moltonseite - Einstellung Bügeleisen 2

Beim Waschen in der Waschmaschine ist es sinnvoll °Emma° in ein kleines Wäscheschutznetz zu geben. Dies schützt das Material und in den Klettverschlüssen bleibt nichts hängen.